

体位変換器の選び方

利用者状態別選定ポイント

A B C D E このマークを目安に選べます。

Cさん



通常の体調であれば自分で動けるので必要ない方です。体調不良等で長時間同じ姿勢が続くことが予測される際には、クッション等の考慮が必要です。

Dさん



自ら動けることの確保と二次的障害の防止を考慮することが必要な方です。ベッド上での移動のためにスライディングシートなどを使用することで、動作や介護が容易になります。

Eさん



自らの動きは僅かであるため二次的障害の防止を目的に体位変換器等の選択が必要な方です。床ずれの防止にポジショニングクッション、介護負担の軽減のためにスライディングシートなどの使用を検討する必要があります。

体位変換クッション

姿勢保持は、一つの姿勢に固定してはいけません。可能な動きは促進しつつ、身体とところを安定させるクッションの選定とポジショニングを行いましょう。



体位変換用具

●自立・介護補助タイプ

●介護補助タイプ

●自動タイプ



ポジショニングの目的

ポジショニングには、さまざまな目的があります。

- 床ずれ防止
- 拘縮／変形防止
- 筋緊張の緩和と調整
- 呼吸の改善
- 浮腫の改善
- 姿勢の安定により活動を促す
- 座位や立位の準備として

大きく分けて2つのポジショニングがえられます。

- ・身体を安定させ保持する
- ・動きを促進し能力や可能性を広げるために支持する



※ 車いす上での姿勢保持のためにもご利用いただけます。

補助道具の選び方

ポジショニングピローやクッションは、素材と用途によって大きく2つに分けられます。

広い面をサポートするもの

ウレタンやビーズ素材など、身体の形状にフィットして広い面をサポートするもの。接触面が多いと皮膚への刺激が多いので、力を抜くことを目的にする場合に使用します。



POINT

接触面が多いということは、汗をかきやすくなるため、通気性に優れたものや洗浄できるものを選びましょう。

身体を支持するもの

少し硬めで、しっかり感がある素材を用いたもの。療養者を適度なしっかり感で緊張を最小限に抑えて、姿勢をサポートします。



POINT

柔らかすぎる素材のクッションは、身体がどこまでも沈み込んでいくような感覚があるため、療養者に不安感を与えてしまうので要注意。

※ 硬い素材の枕や座布団などの使用は、ポジショニングの効果を十分に発揮できないおそれがありますのでご注意ください。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

徘徊感知機器

ロンボ ポジショニング
スネーククッション RM46200 ラックヘルスケア

A B C D E

756017 TAIS/00245-000102

●サイズ：長さ220×幅20cm

1本のクッションで
30度側臥位等をサポートします



カバーがつかます。

個人負担額
300円

ロンボ ポジショニング
初期導入セット ラックヘルスケア

A B C D E

756016 TAIS/00245-000103

汎用性の高いピローを5種類（計6個）
組み合わせることにより、
様々な良肢位を確保できます

①RF1 RF21118

●サイズ：長さ60×幅40cm

②RF5 RF21145

●サイズ：長さ80×幅80cm

③RF3 RF32804

●サイズ：長さ40×幅23cm（2コ）

④RM1 RM43036

●サイズ：長さ75×幅65cm

⑤RM2 RM41934

●サイズ：クッション本体／長さ80×幅40cm
フラップ部／長さ80×幅20cm



カバーがつかます。

個人負担額
750円

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

徘徊感知機器

ロンボの種類と使い方

「振る」

ピローを振ることによって、中身の厚みや形状を調整できます。



「つまむ」

ピローをつまんで引き出すことで、身体への接触部分を微調整できます。



「入れる」

大きなピロー（RF5）に小さなピロー（RF3）を入れることでボリュームがアップします。より安定感を出したいときに有効。



「揺らす」

ピローに身体をのせたまま揺らすことで、より身体の形状にフィットし、なじませることができます。



RF3

23×40cm 枕型



■高さの補助



■手先のポジショニング



RF5

80×80cm 大型
ソフトタイプの
マルチクッション



■円背の頸・背部のサポート



■下肢の拘縮

RM1

65×75cm 4段型
折り曲げて
丸めて使える



■下肢のサポート



■上肢のサポート

RM2

40×80cm 枕型
フラップ付き
30度側臥位をサポート



■30度側臥位のサポート



スネーク

φ20×220cm
1本のクッションで
側臥位をサポート



■下肢のサポート



■頭・肩・腕までをサポート



■側臥位をサポート



■全身のポジショニング(例)



ビーズパッドIタイプセット CK-240 ケーブ



756005 TAIS/00206-000054

- サイズ：長さ195×幅8cm
- 重量：0.52kg
- 材質（中身）：発砲ポリスチレン（マイクロビーズ）

個人負担額
200円



寝返りの打ちやすさをサポート



下股の拘縮予防に




カバー付き



「身体の動きをサポートする」「安定を得る」状態に合わせて2つの側面から姿勢体位管理ができる補助用具です

- マイクロビーズは、汗を吸収しても動きがなめらかでシルクタッチのやさしい肌触りです。
- 丸洗いできるのでいつも清潔を保てます。

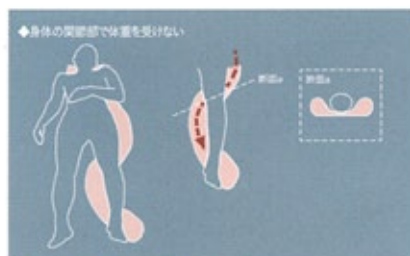

「ポジショニング」に対応



「アクティブポスチャーサポート」に対応

ナーセトパットA(3ピース) NP アイソネックス



756000 TAIS/00149-000012

- サイズ：（大ピース）全幅40×全高10×奥行40cm
（小ピース）全幅40×全高10×奥行20cm
- 重量：（大ピース）0.85kg
（小ピース）0.45kg×2 計1.75kg
- 材質：低反発性高密度特殊ウレタン

個人負担額
250円

三角パットの自在な組合せで多様な用途に対応できます

- 体位変換
- 良肢位の保持
- 床ずれ部位の除圧



ライトターン アイソネックス



756020 TAIS/00149-000017

- サイズ：全幅43×全高39×全奥行13cm
- 重量：0.95kg（カバー含む）
- 材質：高密度高硬度ウレタン
高密度高弾性ウレタン
高密度低弾性ウレタン

個人負担額
200円

関節の拘縮や床ずれ防止にシーツ等のシワのばしにオムツ交換に



スーパー介助マットK02 モルテン



83cm幅 MSK-02

724220 TAIS/00054-000001

厚さ7.0cm

個人負担額
600円

設定した体位変換を自動で行います

（在庫限定） 非課税



ルディックスライド ミディ パシフィックサブライ



720025 JAN/4524491001248

- サイズ：全長80×幅74cm
- 重量：0.45kg
- 材質：裏布 / ポリエステルニット
内布 / ポリアド3D特殊加工布
中綿 / ポリエステル

個人負担額
200円

北欧の知恵と経験から生まれた移動・移乗のためのソフトタイプのスライディングシートです寝たきりで身動きが困難な人を楽に移動・移乗できます

